

energy line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедического изделия

GENUFLEX PLUS
БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

DKN-103


WWW.ORLETT.RU

PROPRIOPRESSION® – инновационная зарегистрированная технология вязки из уникальных материалов, обеспечивающая доказанное усиление проприоцепции (мышечного чувства) и ощущения защищенности сустава. Эффект достигается за счет идеально точного прилегания ортезов и медицинской дозированной поддержки суставов. Естественный термо- и влагообмен, микромассажный эффект в зоне нагрузок ускоряют восстановление и обеспечивают исключительный комфорт при любой активности. Усиление проприоцепции в ортезах **ORLETT Energy Line**, изготовленных по технологии **PROPRIOPRESSION®**, протестировано и подтверждено ведущими медицинскими научно-исследовательскими центрами.

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ПЛОСКАЯ ТРЁХМЕРНАЯ ВЯЗКА

- Обеспечивает максимальное анатомическое прилегание
- Стабилизирует и разгружает сустав
- Распределяет компрессию по всей длине бандажа, снижая её к краям
- Обладает противоотёчным действием
- Сохраняет нормальное кровообращение, не создает эффект «жгута»

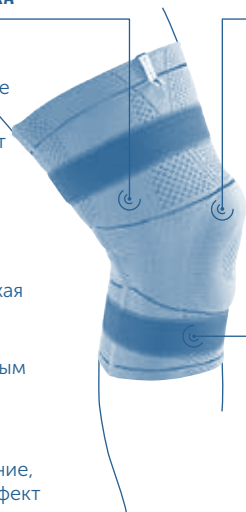

ВЯЗКОЭЛАСТИЧНАЯ ВСТАВКА

- Снимает давление с коленной чашечки
- Оказывает дополнительное массажное действие
- Препятствует нарастанию и перераспределению отека

ФИКСИРУЮЩИЕ РЕМНИ

- Обеспечивают дополнительную фиксацию сухожилий мышц бедра и голени
- Перераспределяют нагрузку на костно-мышечные структуры
- Способствуют снижению болевых ощущений

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- вторичная реабилитация после травм и операций на коленном суставе;
- гониты;
- воспалительно-дегенеративные заболевания коленного сустава, в т.ч. сопровождающиеся болевым и отечным синдромами;
- пателлофemorальный болевой синдром;
- тендомиопатии;
- профилактика травм коленного сустава, в т.ч. в спорте.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойно-септические заболевания кожных покровов в области применения изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения изделия.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Бандаж натянуть на область коленного сустава так, чтобы вязкоэластичная вставка расположилась вокруг коленной чашечки.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

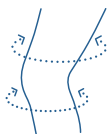

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность бедра на 15 см выше середины коленного сустава и окружность голени на 5 см ниже середины коленного сустава.

Согласно полученным результатам подобрать бандаж Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность бедра на 15 см выше середины коленного сустава, см	Окружность голени на 5 см ниже середины коленного сустава, см
XS	41-43	28-31
S	43-46	31-34
M	46-49	34-37
L	49-52	37-40
XL	52-56	40-43
XXL	56-58	43-46

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется проверить изделие. Важно, чтобы бандаж был удобен.



ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

СОСТАВ

44,6% полиамид, 8,3% эластан, 4,8% полиэстер, 3,5% термопластичный полиуретан, 11,8% сталь, 27% силикон.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. DKN-103, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи бандажа при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09550 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74410 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

